
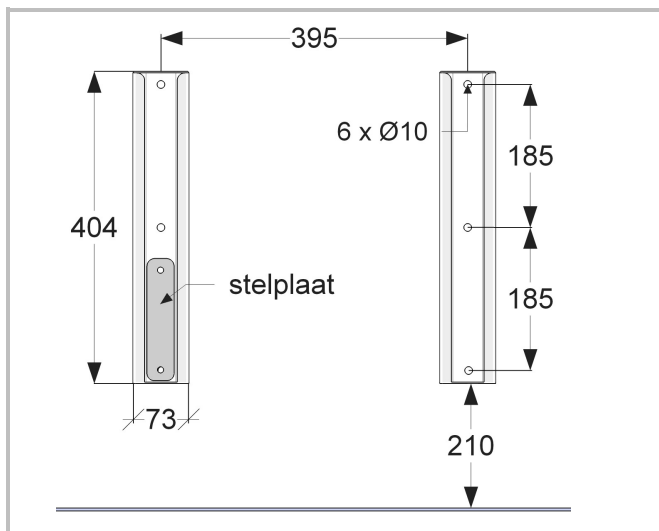


Montagevoorstel *

Set wandrails voor douchezittingen

Artikelnummering:

520040 (RVS gepolijst) / 520040C (RVS wit)

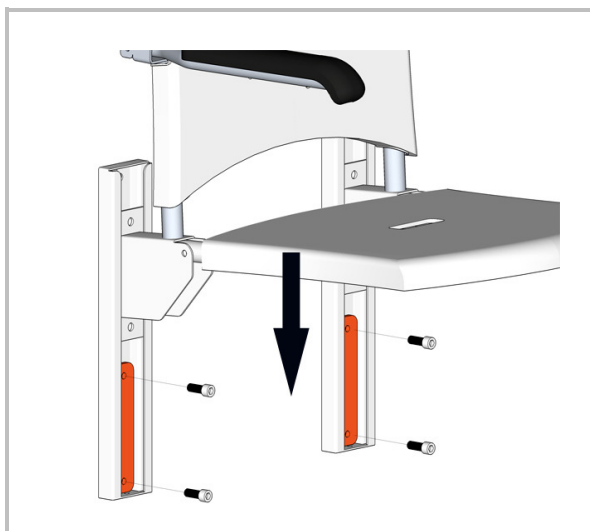

Dit montagevoorstel is gebaseerd op een zithoogte van 370 mm tot 600 mm.

De douchezitting is binnen de rail 230 mm verstelbaar

Attentie: rails evenwijdig aanbrengen zodat stellen eenvoudig is!

Rail-in systeem douchezittingen

- afstand rails hart op hart 395
 - teken de boorgaten met onderkant rail op 210 vanaf vloer
 - breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
 - zet de rail vast voorzien van de volgringen
 - afdekkappen aanbrengen
- stelplaten in rails plaatsen
 - douchezitting in rail laten zakken voor de stelplaten
 - de 4 inbusbouten 8 x 22 in de stelplaten draaien.
Attentie: nog niet vastdraaien!
- douchezitting op gewenste gebruikershoogte plaatsen en de inbusbouten verder vastdraaien

Attentie: Indien nog geen douchezitting aanwezig is, de stelplaten en inbusbouten in de rails plaatsen om verlies te voorkomen!

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik

Uitgave 2017